



Clickfine®

Enjoy brilliance.



swissmade+

mylife™ Clickfine® DiamondTip – Mer komfort med den perfekta spetsen.

- 6-fasetterad kanylspets för en mjukare injektion^{1,2}
- Extra tunnväggig kanyl för optimerat läkemedelsflöde³
- Klickteknologi för lätt och säker passning
- Speciell ytbehandling med silikon för avancerad injektionskomfort
- Passar alla ledande fabrikat av injektionspennor⁴ och finns i längderna 4 mm, 5 mm, 6 mm och 8 mm

DIAMOND TIP



More freedom. More confidence. With mylife™.


YPSOMED
SELF CARE SOLUTIONS



DiamondTip – Upptäck din pennkanyl


För extra skonsam injektion¹

Pennkanylen mylife™ Clickfine® DiamondTip har en tunnare spets tack vare den innovativa 6-faldiga fasetteringen, som ger mindre motstånd under injektionen.

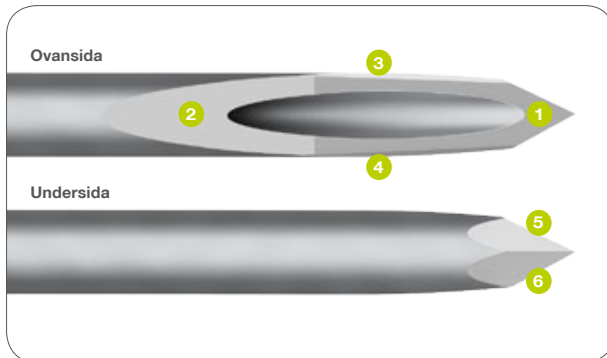


Diamond Tip: 6-faldigt fasetterad nålspets med hög precision ①–⑥. Finns i längderna 4 mm, 5 mm, 6 mm och 8 mm.

41 % mindre kraft = skonsam injektion

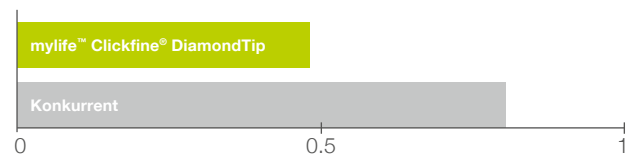

Injektionskraft i N

Testet visar att injektioner med mylife™ Clickfine® DiamondTip kräver mindre kraft än en konkurrentprodukt.¹

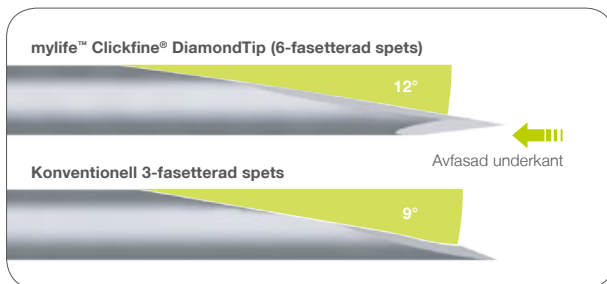

mylife™ Clickfine® DiamondTip med den innovativa 6-faldiga fasetteringen:

Den tunna kanylspetsen har 4 fasetteringar på ovansidan och 2 på undersidan. Avfasning från två sidor i kombination med de skärande vinklarna gör att pennkanylen blir jämförelsevis spetsigare och vassare. Resultatet blir en skonsam och mjuk injektion.


Bekräftat av användare

Användare testade och bedömde mylife™ Clickfine® DiamondTip beträffande injektionskomfort.²



77,3 % kände mindre smärta.

- Kände mycket mindre smärta
- Kände något mindre smärta
- Kände ingen skillnad
- Kände mer smärta

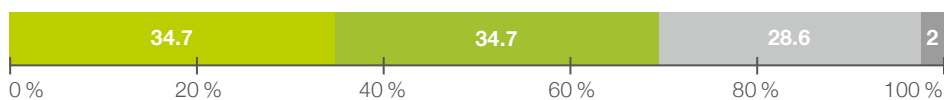

69,4 % behövde mindre kraft.


- Behövde mycket mindre kraft
- Behövde något mindre kraft
- Märkte ingen skillnad
- Behövde mer kraft



Extra tunnväggig kanyl

För optimerat läkemedelsflöde

Större innerdiameter vid oförändrad ytterdiameter⁵

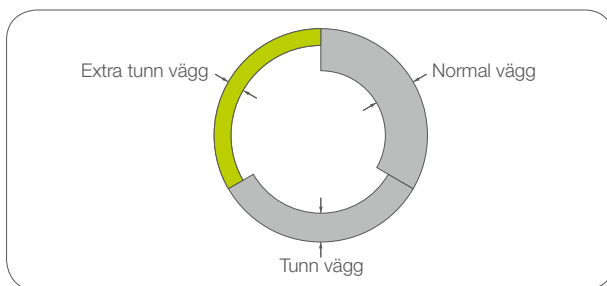


- Förbättrad medicinering på grund av högre flöde³
- Eftersom kanylen har större innerdiameter behövs mindre kraft på injektionsknappen³
- Passar för enkel dosering av högkoncentrerat insulin från 200 E/ml




Egenskaper av högsta kvalitet

Upplev tillförlitlig komfort

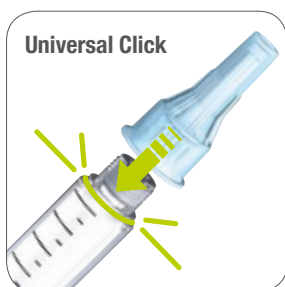

Patenterad universal click-teknologi gör det lätt att fästa kanylen på injektionsspennan.

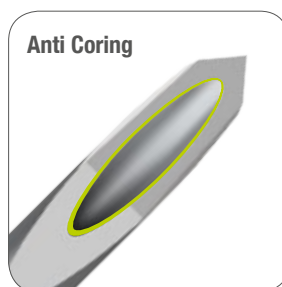

Den speciella behandlingen tar bort ojämnheter, gör att den slipade kanten inte blir ojämn och möjliggör en mjuk injektion.



Speciell silikonytbehandling ger konstanta glidegenskaper och mjuk penetrering.




Yttre skyddshuv som ger bra grepp. Fri flik för snabb och säker bortdragning av skyddsplasten.




Lätt från början


Klickar fast på alla ledande fabrikat av injektionspennor⁴

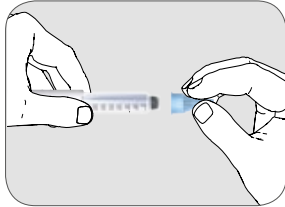


Klicka fast kanylen och tryck den rakt ned – du hör ett "click" när den sitter säkert.

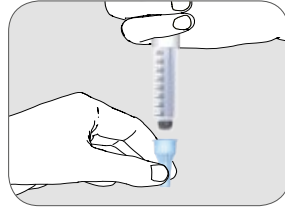

Tips: Håll kanylen lodrätt mot ett bord och klicka fast pennan på den upifrån.

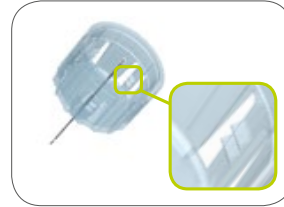


Fem dubbla piggar för säkert fäste.

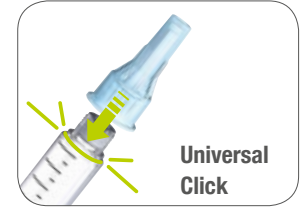

Patenterad universal click-teknologi.

Bekräftat av användare

Användare testade och bedömde click-teknologin för mylife™ Clickfine® DiamondTip:

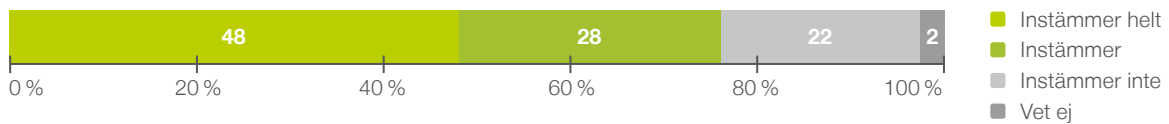

76 % behövde mindre tid till att förbereda insulininjektionen på grund av click-teknologin.



“Click” före varje injektion


Varje pennkanyl är steril och avsedd för engångsbruk

Risker vid flergångsanvändning

- Pennkanylen blir trubbigare och kan deformeras. Det ökar risken för vävnadsskador som lipohypertrofi.
- Pennkanylen är inte längre steril. Risken för infektioner ökar.
- Insulin kan kristallisera i pennkanylen och sätta igen den.
- Insulinets effekt blir sämre. Det kan medföra oförklarliga svängningar i blodglukosnivåerna



Ny kanyl

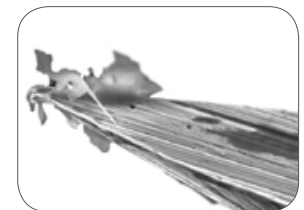

Använd pennkanyl med vävnadsrester



Den här symbolen på förpackningarna anger att pennkanylerna är **engångsprodukter**.



Korta pennkanyler

Tillförlitlig subkutan injektion


Rätt injektionsteknik är väsentlig för att undvika intradermala eller intramuskulära injektioner, för att ge optimal tillförsel subkutan och för att undvika komplikationer som lipohypertrofi.

- 4 mm och 5 mm pennkanyler förenklar injektionstekniken. Injektioner kan ofta ges vinkelrätt utan att ett hudveck görs (barn, ungdomar och slanka vuxna bör göra hudveck).⁶
- Med korta pennkanyler minskar risken för oavsiktliga injektioner i muskler med risk för allvarlig hypoglykemi.^{6,7}
- Vid injektioner med hudveck använder personer med diabetes ofta ett begränsat område för injektionen, och det kan t.ex. öka risken för lipohypertrofier till höger och vänster mitt på buken.⁶
- Hudens tjocklek (överhud och läderhud) är sällan mer än 3 mm, oberoende av BMI (body mass index),⁸ så det räcker oftast med en kortare pennkanyl.


1 Hud (överhud och läderhud)

2 Subkutan fettvävnad (underhud)

3 Muskel

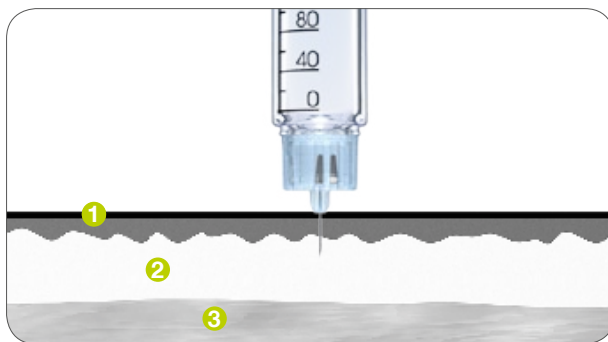

- ✓ Med en 4 mm och 5 mm pennkanyl kan man ofta göra säkra subkutana injektioner utan att göra ett hudveck.

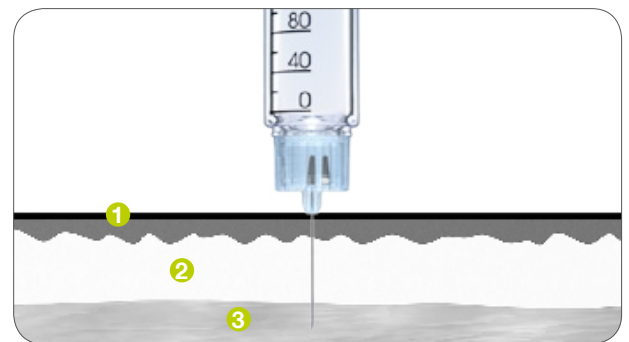

- ✗ Med långa pennkanyler ökar risken för injektion i muskeln.



Välja rätt kanyllängd

Användarvänlig färgkodning

mylife™ Clickfine® DiamondTip kanyler med 6-faldig fasettering och extra tunn vägg finns i fyra olika längder och olika ytter- (gauge) och innerdiametrar.



Produktöversikt

Artikel	Innehåll	Kanyldiameter	Kanylspets	Artikelnummer
mylife™ Clickfine® DiamondTip 4 mm	100 st.	32G/0,23 mm, Extra Thin Wall	6-fasetterad	70000481
mylife™ Clickfine® DiamondTip 5 mm	100 st.	31G/0,25 mm, Extra Thin Wall	6-fasetterad	700009663
mylife™ Clickfine® DiamondTip 6 mm	100 st.	31G/0,25 mm, Extra Thin Wall	6-fasetterad	70000482
mylife™ Clickfine® DiamondTip 8 mm	100 st.	31G/0,25 mm, Extra Thin Wall	6-fasetterad	70000483

Längderna 10 mm och 12 mm finns med 3-fasetterad spets och tunnväggig kanyl.



Produktöversikt

Artikel	Innehåll	Kanyldiameter	Kanylspets	Artikelnummer
mylife™ Clickfine® 10 mm	100 st.	29G/0,33 mm, Thin Wall	3-fasetterad	3200927
mylife™ Clickfine® 12 mm	100 st.	29G/0,33 mm, Thin Wall	3-fasetterad	3200928



Universal click

mylife™ Clickfine® passar alla ledande fabrikat av injektionspennor⁴

mylife™ Clickfine® pennkanyler har testats enligt ISO 11608-2:2012. De är fullt fungerande när de används med de injektionspennor som anges på webbplatsen och på förpackningen med mylife™ Clickfine® pennkanyler.

Passar följande injektionspennor:

www.mylife-diabetescare.se/cf/pennkompatibilitet

www.mylife-diabetescare.fi/cf/kyna-yhteensopivuus

¹ Teknisk rapport, 2018 (10174351). Arkiverade data.

² Resultat från en användarenkät (n=150) juni 2014 till juni 2015, utförd av IFAK Institut GmbH & Co. KG, Tyskland, arkiverade data.

³ Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, *Clinical Therapeutics*, 35(7):923-933, 2013.

⁴ Se pennkanylförpackningen eller vår webbplats www.mylife-diabetescare.se

⁵ Kanylröret är tillverkat av rostfritt stål för medicinska produkter – ISO 9626:2016.

⁶ Frid A. et al.: New Insulin Delivery Recommendations 91(9):1231-1255, September 2016.

⁷ Frid A. et al.: Hypoglycemia risk during exercise after intramuscular injection of insulin in thigh in IDDM. *Diabetes Care*. 13(5):473-477, 1990.

⁸ Gibney MA et al.: Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with diabetes at sites used for insulin injections: implications for needle length recommendations. *Curr Med Res Opin*. 26(6):1519-1530, 2010.



Diabetescare

More **freedom.**
More **confidence.**
With **mylife™.**



Infusionssystem



Blodglukosmätare



Hantering av
behandlingen



Pennkanyler

Med mylife™ Diabetescare erbjuder Ypsomed ett omfattande sortiment av produkter och tjänster för personer med diabetes. Användarna får allt som behövs för enkel, diskret och pålitlig egenvård. Med mylife™ Diabetescare blir egenvård en självklarhet.

Sverige

Ypsomed AB // Adolfsbergsvägen 31 // 168 67 Bromma //
info@ypsomed.se // www.mylife-diabetescare.se // Kundtjänst: 08 601 25 50

Finland

Ypsomed Oy // Eteläinen Salmitie 1 // 02430 Masala //
info@ypsomed.fi // www.mylife-diabetescare.fi // Kundtjänst: +358 (0)9 250 1350